

サインストレッチャー取り扱い説明書

警告

- ・あくまでも緊急時に救急車が入れる場所まで対象者を運ぶためのストレッチャーです。使用案内のボードをごらん頂き正しくご利用下さい。
- ・看板としてご利用頂く場合は、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。


注意

- ・パネル部分は雨などに濡れても大丈夫ですが、防水性能はありません。
- ・緊急時に一旦取り外したパネル部分は、破損が無ければ再度取り付け可能です。背面の金具等をチェックし何度でもご利用下さい。
- 【重要】人を乗せるシート部分（ターポリン）は耐久年数があります。（交換は販売元にお問合わせ下さい）




セット内容

はじめに、梱包内容が揃っているかをご確認下さい。

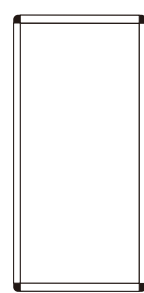

パネル(面板付) 1枚

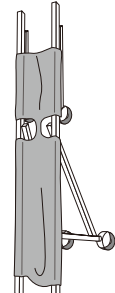

本体パーツ 1セット



ボルト 8本



横パイプ
パイプ小 1本
パイプ大 3本



六角レンチ 1本



取扱説明書 1枚

※手順にそって組立を行っていきます。
組立の際には付属の六角レンチで
ボルトが動かなくなるまで
締め込んで下さい。

※本商品は屋外対応ですが、
防水機能はございません。

※また、本製品が防災機器としての機能を
損なわない様、定期的にビスの緩みや
フレームの歪みなどご確認頂く事を
お願いいたします。


組立方法

【ご注意】フレームを組み立てる際にパイプの向きにご注意下さい(右図参照)。
組立の際はボルトを付属の六角レンチで動かなくなるまで締め込んで下さい。




図：パイプには三辺に溝があり1辺だけ溝がありません。
取り付けの際に向きをご確認下さい。


① パイプ大とパイプ小を取り付け、ボルトで固定します。

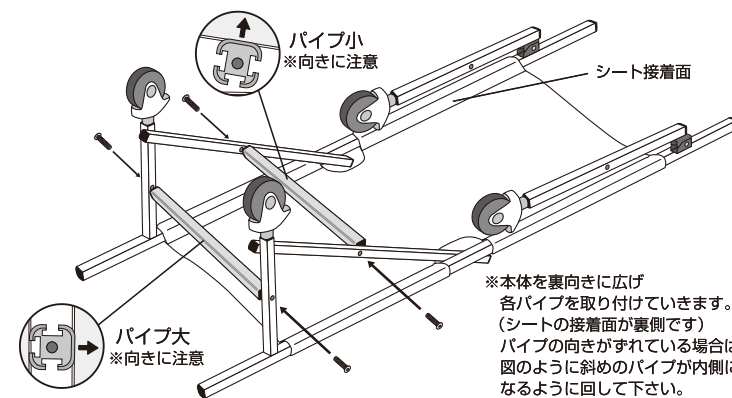


② パイプ大を取り付け、ボルトで固定します。

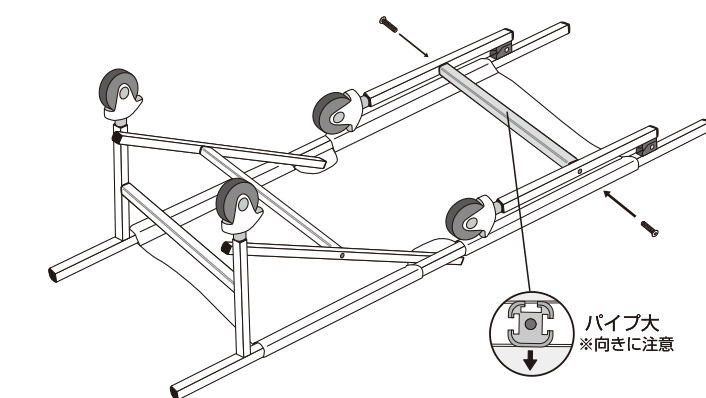

③ パイプ大を取り付け、ボルトで固定します。

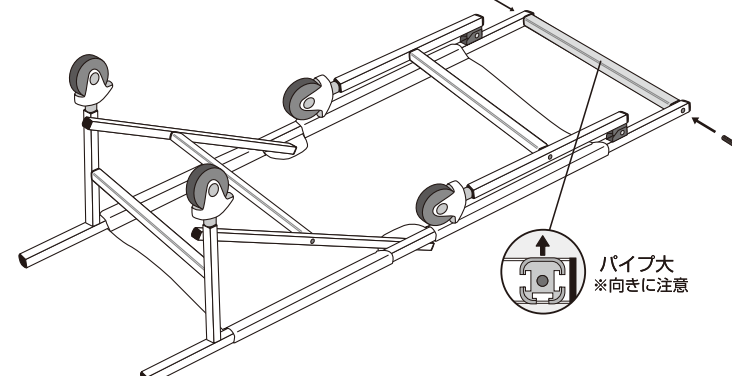


④ スタンドを表向きに立てれば完成です。

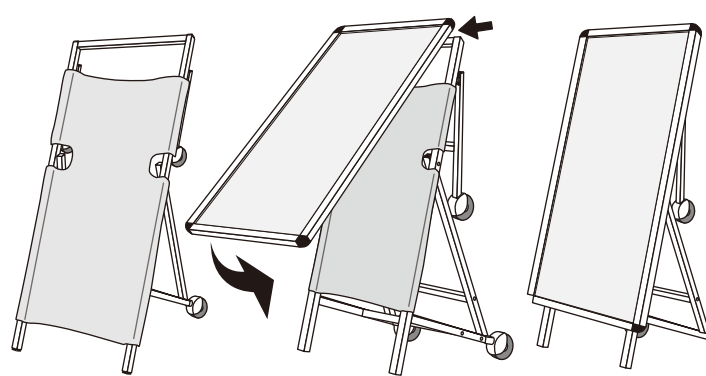


ストレッチャーとしてのご利用方法

緊急時に非常用ストレッチャーとして
活用して頂く事ができます。


① パネルを手前に持ち上げ、上にスライド
させるようにして取り外します。

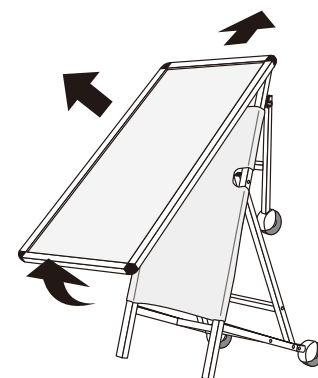


② 上側2本の安全ピンを抜き、
2箇所ギアのロックを外します。

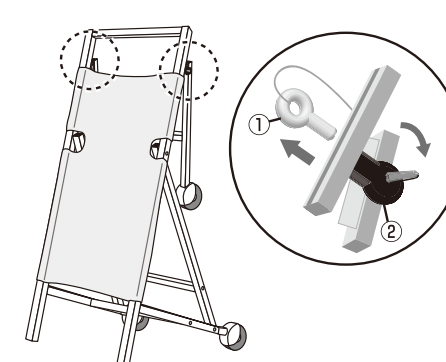

③ 脚部を開きながら静かに倒します。

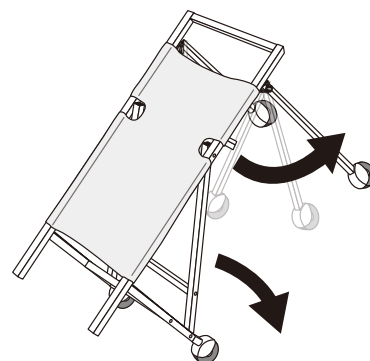

④ 脚部が本体と直角になるようにして
ギアをロックし、「②」で外したピンを差します。

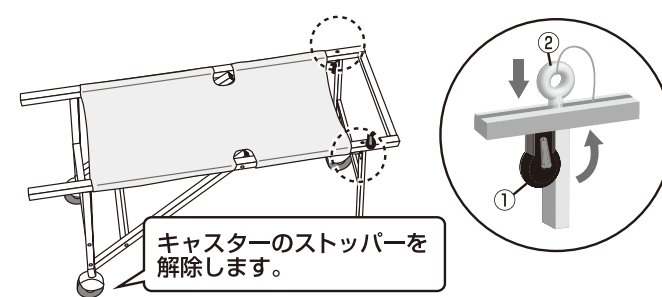

約100kgまで
搬送できます。



ストレッチャーへの変形方法 ▶

ストレッチャーに変形させる方法は、
QRコードより動画でご覧頂けます。



脚部を開く際の指づめ注意

脚部を開く際は、必ずキャスター部のパイプを持って開閉してください。
ギア付近を持つと手や指を挟む可能性があります危険です。



ご使用についてお願い

- ・あきらかに医師や救急隊員の判断が必要と思われる対象者には
安静を守りむやみに移動させないで下さい。
- ・人の他に物資(水タンク等)を運ぶ際には、ターポリン素材の
性質状、伸びる点等に考慮し積み方に注意して下さい。

設置の際に

- ・いたすらで利用されない工夫を設置側のお客様で行って下さい。
(利用時「声掛け必要!」の注意の貼り出しなど)
- ・皆様の助け合い、思いやりの心で善意でご利用頂ける事を心より
お願い申し上げます。